

KOMFORTNÝ 2-v-1 ŠTVORKOLKOVÝ CHODÍTKO

ÚČEL VÝROBKU

Tento chodítko je vhodné pre ľudí s problémami s pohyblivosťou. Môže sa používať aj ako pomôcka na uľahčenie ambulantnej starostlivosti. Nesmú ho používať ľudia s evidentnými poruchami rúk a ramien, ani ľudia s poruchami rovnováhy. Chodítko sa môže používať v interiéri aj exteriéri. Odporúčame používať ho na rovnom povrchu, kde sú všetky kolieska v kontakte so zemou. Nesmie sa používať na kamenných povrchoch alebo svahoch, pretože chodítko môže byť nestabilné. Zariadenie nie je určené na prepravu osôb alebo predmetov.

VAROVANIE:

Produkt nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v návode. Výrobca a dodávateľ nezodpovedajú za žiadne škody vyplývajúce z používania produktu spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na použitie. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať a vylepšovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Nikdy neinštalujte ani nepoužívajte zariadenie, kým si neprečítate a neporozumiete tejto príručke. Ak nerozumiете akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, poraďte sa so svojím obchodným zástupcom alebo technickým personálom pred pokusom o inštaláciu tohto zariadenia, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

UPOZORNENIA PRE POUŽÍVATEĽOV

- Uistite sa, že brzdový kábel je správne nastavený.
- Po každom nastavení výšky skontrolujte, či brzda funguje správne, aby sa zabránilo nesprávnemu nastaveniu alebo ohnutiú brzdového lanka.
- Porušenie týchto základných pravidiel môže spôsobiť zranenie.
- Chôdza sa smie používať iba na tvrdých, rovných povrchoch. Neužívajte zariadenie na schodoch.
- Vždy udržiavajte rovnováhu na oboch rukovätiach.
- Venujte osobitnú pozornosť pohybu na mokrých, zľadovatených alebo zasnežených povrchoch.
- Zariadenie nepreťažujte.
- Sedadlo nepoužívajte na prepravu osôb alebo materiálov; sedadlo je určené na sedenie používateľa iba v stoji a je možné ho používať iba s aktivovanou parkovacou brzdou. (Musí byť trvalo zapnutá.)
- Všetky kolesá musia počas používania zostať v kontakte s povrchom, aby bola zabezpečená správna rovnováha chodítka a maximálna bezpečnosť.
- Pred použitím sedadla je potrebné chodítko zabrzdiť.

Poznámka: Ak sa chodítko používa ako opora v stacionárnej polohe, musí byť aktivovaná ručná brzda. Chodítko musí byť trvalo zabrzdené.

NOSNOSŤ:

Chôdza môže byť používaná osobami s hmotnosťou do 100 kg, VČETNE úložného vaku.
Maximálna nosnosť úložného vaku je 5 kg.

UPOZORNENIE K MONTÁŽI:

- Po rozložení chodítka zo zloženého stavu skontrolujte, či sú obe časti rámu úplne vysunuté a či je rozpierka medzi týmito časťami zaistená v doraze a nachádza sa v horizontálnej polohe.
- Obe rukoväte musia byť bezpečne upevnené v rúrkach hlavnej časti pomocou skrutiek s plastovými hlavami.
- Na rám chodítka nič nezavesujte – hrozí poškodenie. Poškodenie rámu môže spôsobiť nesprávnú funkciu, zhoršenú ovládateľnosť a následne zranenie.
- Pri rozkladaní a skladaní chodítka dávajte pozor, aby ste si nezachytili prsty a/alebo oblečenie.

VŠEOBECNÝ POPIS



PRED POUŽITÍM

Vždy skontrolujte:

Či sú všetky časti chodítka bezpečne upevnené.
Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté. Uistite sa, že sedadlo je správne upevnené.
Skontrolujte, či je sedadlo v správnej polohe.
Skontrolujte, či obe brzdy fungujú správne.
Skontrolujte opotrebenie častí výrobku, aby ste sa uistili, že výrobok je úplne bezpečný pre používateľa a jeho okolie.

PRED MONTÁŽOU

Vybalte výrobok a skontrolujte, či nebol poškodený počas prepravy. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho a kontaktujte svojho predajcu.

MONTÁŽ MODELU

Montáž chodítka

Rozložte chodítko tak, že obe časti rámu vysuniete na maximálnu dĺžku a bočné vzpery medzi týmito časťami zaistíte v horizontálnej polohe. Vložte rúrky rukoväti do rámu a zaistite ich podľa nižšie uvedeného postupu.

Nastavenie rukovätí

Výšku rukovätí nastavte pomocou bočných skrutiek s plastovými hlavami, ktoré zasuniete do požadovaných otvorov v rúrkach rukovätí. Odskrutkujte skrutku a vysuňte ju z rúrky rámu, umiestnite rukoväť do požadovanej výšky, zasuniete skrutku späť cez rúrku rámu a rúrku rukoväti do otvoru vo zvolenej výške a otočte skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste ju opäť utiahli. Postup opakujte s druhou rukoväťou a uistite sa, že obe rukoväte sú umiestnené v rovnakej výške.

VAROVANIE:

Uistite sa, že poloha rukovätí zodpovedá smeru pohybu chodítka. Ak rukoväť nie je rovná, hrozí nebezpečenstvo, že sa chodítko bude triasť alebo prevrátiť, najmä ak ho tlačíte väčšou silou. Preto musia byť poistné skrutky na rúrkach rukovätí pevne utiahnuté.

Inštalácia oporného ramena:

Oba konce rúrky zasuniete do objímok na rúrkach rámu. Podporné rameno je možné umiestniť na ľubovoľnú stranu rámu, takže si môžete vybrať, na ktorej strane budete sedieť. Ak chcete sedieť čelom dopredu, môžete použiť spodnú opierku nôh, ktorú je možné zložiť do chodítka, keď ju nepoužívate.

Skladanie chodítka

Potiahnite bočné rozpínacie ramená nahor a stlačte obe časti rámu k sebe. Dávajte pozor, aby ste si nezachytili prsty alebo oblečenie.

Nákupný košík

Nákupný košík je pripevnený k rámu chodítka pomocou dvoch háčikov.

UPOZORNENIE: Košík používajte len na malé predmety. Košík nepreplňujte, aby sa neprevrhol!

Sedadlo

Predtým, ako si sadnete, umiestnite chodítko na rovný, pevný povrch a potom zaistíte brzdy. Uistite sa, že brzdy sú bezpečne zaistené a že chodítko je v stabilnej polohe.

UPOZORNENIE: Sadnite si tak, aby bola vaša hmotnosť rovnomerne rozložená po sedadle. Nesadajte si len na jednu stranu.

PRAKTICKÉ POUŽITIE

- Začnite tlačiť chodítko, keď stojíte vzpriamene s oboma rukami na rukovätiach.
- Uistite sa, že máte suché ruky, aby nedošlo k pošmyknutiu.
- Pri chôdzi sa držte vzpriamene a pozerajte dopredu, nie dole.
- Neodťahujte chodítko príliš ďaleko od tela, pretože by to mohlo spôsobiť pád a nesprávne rozloženie váhy.
- Nepreskakujte s chodítkom prekážky vyššie ako 20 mm.
- Pri používaní vonku uprednostňujte chodníky.

Brzdy

Ako brzdiť

Na zabrzdenie chodítka potiahnite brzdovú páku prstami nahor, kým chodítko nezpomalí alebo nezastaví. Na pokračovanie v pohybe uvoľnite brzdovú páku.

Zablokovanie brzdy

Stlačte brzdovú páku smerom nadol. Keď počujete „kliknutie“, kolesá sú zablokované.

UPOZORNENIE: Vždy zablokujte kolesá, keď chodítko nepoužívate.

Odblokovanie kolies

Potiahnite obe brzdové páky, kým sa brzdy neuvoľnia.

ÚDRŽBA

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Na opravy sa používajú výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo. Životnosť výrobku závisí od používania, údržby, skladovania a čistenia.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Čistenie

Na čistenie dielov používajte iba vlhkú handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené použitím materiálov, ktoré by mohli poškodiť povrch výrobku počas čistenia, alebo korozívnymi chemikáliami.

Dezinfekcia

V prípade potreby dezinfikujte výrobok bežným dezinfekčným prostriedkom. Nepoužívajte abrazívne látky, kyseliny, čistiace prostriedky na báze alkoholu a chlóru, dezinfekčné prostriedky a acetón, ktoré by mohli spôsobiť nenapraviteľné poškodenie povrchu profilu.

Údržba kolies

Kolesá čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Osušte ich čistou handričkou. Kolesá sú vybavené ložiskami, ktoré je potrebné občas namazať.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kód produktu										
Sedadlo	34 x 38									
Konstrukce	cm									
Rozměry a hmotnost	ocel									
Rozměry v cm										
	70	87 94	54	63	53	67x29x101	5			max. nosnost 100 kg

Ochrana životného prostredia

Na konci životnosti výrobku alebo ak už nie je oprava ekonomicky rentabilná, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akékoľvek vady, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste výrobok upravili alebo nedodržali pokyny v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku bežného používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
- chyby spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu, nárazu alebo úderu výrobku atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.

V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na obsluhu a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočného výrobku v závislosti od modelu.

Maďarský návod si môžete stiahnuť tu:
Rumunský návod si môžete stiahnuť tu:
Slovenský návod si môžete stiahnuť tu:
Poľský návod si môžete stiahnuť tu:

